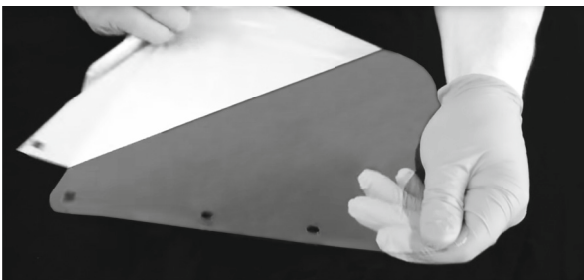

Gesichtsschild

Inhalt:

Kunststoffschild
Schaumstoffband
Abstandhalter
Gummiband



Montageanleitung:



1. Ziehen Sie zuerst die hellblauen Schutzfolien von Schild und Abstandhalter ab.



2. Kleben Sie nun den Schaumstoff innen an den Abstandhalter.



3. Jetzt können Sie das Schild auf den äußeren Bogen des Abstandhalters klinken. Achten Sie aber bitte darauf, dass Sie nicht zu viel Druck ausüben, um den ultraleichten Abstandhalter nicht zu beschädigen.



4. Zum Schluss befestigen Sie bitte das Gummiband an den seitlichen Zapfen.

HINWEIS: Das Schild ist kein Medizinprodukt nach MPG!